




ventisept®



CLEANING SOLUTIONS  
DISINFECTING SOLUTIONS  
DISINFECTING ACCESSORIES



واحد تولیدی نیپکو (شرکت شیمیایی نوین پاک شرق) با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی و عرضه فرآورده های ضدعفونی و پاک کننده در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید. به کارگرفتن فن آوری روز، فراهم نمودن شرایط تولیدی تحت GMP دارویی، تولید تحت لیسانس، انتقال دانش فنی از کشورهایمانند سوئیس، آلمان و فرمولاسیون محصولات جدید قابل رقابت با محصولات روز دنیا بخشی از تدابیر به کار گرفته شده برای تضمین کیفیت تولید می باشد.

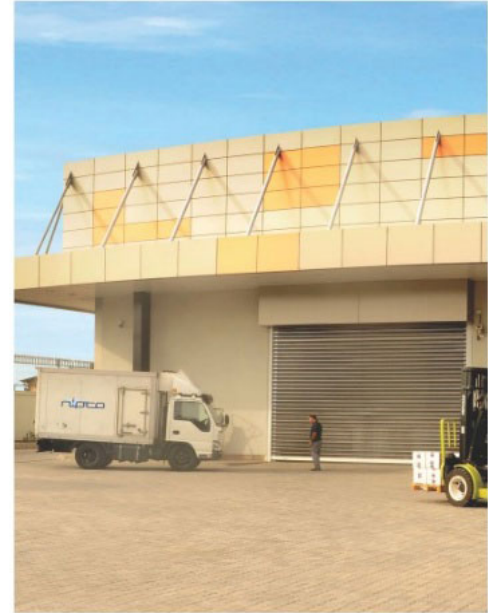





## manocid

Ready for use alcoholic  
hygienic and surgical  
hand rub disinfectant

# manocid

## محلول آماده به مصرف الکلی ویژه ضد عفونی بهداشتی دست و اسکراب جراحی



### موارد مصرف:

- جهت تمام مواردی که بهداشت کامل دستها ضروری است و نیز ضد عفونی دستها قبل از اعمال جراحی
- قابل استفاده در بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی و دندانپزشکی، صنایع غذایی، دارویی و ...

### روش مصرف

- ضد عفونی بهداشتی دست:
- دست ها را به مدت ۳۰ ثانیه با میزان مناسبی از محلول ضد عفونی نمایید.
- اسکراب جراحی:
- دست ها و ساعد ها را به مدت ۹۰ ثانیه با میزان مناسبی از محلول ضد عفونی نمایید.

**برای کسب اطلاعات بیشتر به پروتکل مصرف این محصول (بر اساس استاندارد WHO برای ضد عفونی بهداشتی دست ها و اسکراب جراحی) مراجعه گردد.**

### خصوصیات

- زمان اثر کوتاه
- اثر پایدار و ماندگار در طول مدت جراحی
- حاوی بوتان دیول
- تاییدیه کیفیت و کارائی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- تایید شده بر اساس DIN: EN12791 و DIN: En1500
- تایید شده بر اساس RKI
- تاییدیه دارویی German pharma
- تاییدیه EC Biocide Directive
- تاییدیه VAH/DGHM
- حاوی ترکیبات نرم کننده محافظ پوست
- از بین برنده resident flora و transient flora
- از بین برنده انواع باکتری ها (MRSA)، باسیل ها (TB)، قارچ ها (C.albicans) و ویروس ها (Rota/Vaccinia/HBV/HIV/HCV)



**sanocid**  
Ready for use alcoholic  
skin and hand disinfectant



# sanocid

## محلول آماده به مصرف الکلی ویژه ضد عفونی پوست و دست



### موارد مصرف:

- ضد عفونی محل تزریق روتین: پنبه یا گاز آغشته به محلول را مستقیماً روی ناحیه مورد نظر از پوست سالم بمالید و پس از ۱۵ ثانیه تزریق را انجام دهید.
- ضد عفونی محل جراحی: محل جراحی را به محلول آغشته کرده و پس از گذشت زمان مناسب، جراحی را آغاز کنید.
- ضد عفونی بهداشتی دست: دست‌ها را به مدت ۳۰ ثانیه با میزان مناسبی از محلول ضد عفونی نمایید.
- اسکراب جراحی: دست‌ها و ساعدها را به مدت ۹۰ ثانیه با میزان مناسبی از محلول ضد عفونی نمایید.

**برای کسب اطلاعات بیشتر به پروتکل مصرف این محصول (بر اساس استاندارد WHO برای ضد عفونی بهداشتی دست‌ها، اسکراب و Prep جراحی) مراجعه گردد.**

### خصوصیات

- زمان اثر کوتاه
- مناسب برای تزریقات روتین و آماده سازی پوست قبل از عمل جراحی (pre-surgical prep)
- اثر پایدار و ماندگار در طول مدت جراحی
- فاقد کلرهگزیدین
- تاییدیه کیفیت و کارائی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- تایید شده بر اساس DIN: EN12791 و DIN: En1500
- تایید شده بر اساس RKI
- تاییدیه دارویی German pharma
- تاییدیه EC Biocide Directive
- از بین برنده resident flora و transient flora
- تاییدیه VAH/DGHM
- دارای فرمولاسیون بدون اسانس
- از بین برنده انواع باکتری‌ها (MRSA)، باسیل‌ها (TB)، قارچ‌ها (C.albicans) و ویروس‌ها (Rota/Vaccinia/HBV/HIV/HCV)

Ready for use  
alcoholic disinfectant  
with rapid effect



**موارد مصرف:**  
اسپری آماده به مصرف با پایه الکلی و با اثر سریع جهت ضدعفونی کردن سطوح کوچک بزرگ، تجهیزات و دستگاه‌های پزشکی و دندانپزشکی.

**روش مصرف:**  
محلول را روی ابزار یا سطح مورد نظر اسپری نموده، دقیقه صبر کرده و سپس دستمال بکشید.

**احتیاطها ایمنی:**  
محلول قابل اشتعال می‌باشد. از بوی و تماسی فرارنده با چشم و استعمال دخانیات هنگام استفاده اجتناب گردد. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. از تخلیه به آبهای زیرزمینی خودداری گردد.

**ventisept LIQUID AF**  
Ready for use alcoholic disinfectant with rapid effect  
اسپری ضد عفونی کننده آماده به مصرف الکلی با اثر سریع

**Efficacy range:**  
Bacterioides (MRSA), Fungicidal (Candida), Tuberculobatal, Virucidal (Flu/Varicella/HIV/HCV/BDV/FCV/Herpes)

**Ingredients:**  
ethanol, didcylidmethylammoniumchloride

07N05201102  
تولید شده در ایران  
21613002001102

750ml

0.75L 525C  
تولید شده در ایران



## ventisept LIQUID AF

اسپری آماده به مصرف الکلی  
با اثر سریع، مناسب ابزار و سطوح



### موارد مصرف:

ضد عفونی کردن سطوح کوچک، ابزار، تجهیزات  
و دستگاه های پزشکی و دندان پزشکی.

### روش مصرف

محلول را می توان به دو روش زیر استفاده نمود:

- محلول را روی دستمال تمیز اسپری و روی سطح مورد نظر بکشید.
- محلول را مستقیماً روی سطح یا ابزار اسپری نموده و پس از ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه دستمال بکشید.

**برای کسب اطلاعات بیشتر به پروتکل مصرف این  
محصول (بر اساس توصیه های HSE و AKI برای  
ضد عفونی سطوح و ابزار) مراجعه گردد.**

### خصوصیات

- سریع الاثر
- مناسب برای سطوح دور از دسترس
- مناسب همه انواع سطوح مقاوم به الکل بر اساس توصیه های Biocide Directive
- عدم ایجاد عارضه در اثر تماس با پوست بر اساس Dermatology test
- تاییدیه کیفیت و کارائی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- تایید شده بر اساس استانداردهای EN اروپا
- تایید شده بر اساس RKI
- تاییدیه VAH/DGGM
- مناسب برای ضد عفونی سطوح آشپزخانه ها و صنایع غذایی
- ماندگاری اثر بالا به دلیل برخورداری از ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی
- بدون برج گذاشتن لکه روی سطوح
- عدم تغییر رنگ سطوح
- فاقد فنول و آلدئید
- از بین برنده انواع باکتری ها (MRSA)، باسیل ها (TB)، قارچ ها (C.albicans) و ویروس ها (Rota/Vaccinia/HBV/HIV/HCV/BVDV/FCV)



## ventides GF

اسپری آماده به مصرف غیر الکلی  
با اثر سریع، مناسب ابزار و سطوح



### موارد مصرف:

ضد عفونی و پاکسازی ابزار و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و همچنین مناسب برای شیشه های اکریلیک، سطوح و ابزار حساس به الکل.

### روش مصرف

- محلول را می توان به دو روش زیر استفاده نمود: محلول را روی دستمال تمیز اسپری و روی سطح مورد نظر بکشید.
- محلول را مستقیماً روی سطح یا ابزار اسپری نموده و پس از ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه دستمال بکشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به پروتکل مصرف این محصول (بر اساس توصیه های HSE و AKI برای ضد عفونی سطوح و ابزار) مراجعه گردد.

### خصوصیات

- سریع الاثر
- اثر همزمان ضد عفونی و پاک کنندگی (ONE STEP)
- مناسب ضد عفونی سطوح، ابزار و تجهیزات حساس به الکل مانند پروب های ultra sound و صفحات پلکسی گلاس بر اساس MPG
- مناسب همه انواع سطوح مانند لامپ های سیالیتیک بر اساس توصیه های Biocide Directive
- تاییدیه کیفیت و کارائی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- تایید شده بر اساس استانداردهای EN اروپا
- تایید شده بر اساس RKI
- تاییدیه VAH/DGHM
- دارای حداکثر سازگاری با مواد مختلف
- عدم تغییر رنگ سطوح
- حاوی ترکیبات آمونیم چهار ظرفیتی
- مناسب برای سطوح دور از دسترس
- رایحه مطبوع
- از بین برنده انواع باکتری ها (MRSA)، قارچ ها (C.albicans) و ویروس ها (H1N1/H5N1/ Vaccinia/ HBV/ HIV/ HCV/ BVDV/ FCV)



## ventisept F

Surface disinfectant  
and cleaner concentrate  
aldehyde and phenol-free



# ventisept F

## کنسانتره ضد عفونی و پاک کننده ویژه سطوح



### موارد مصرف:

ضد عفونی و پاک سازی تمامی سطوح بزرگ و کوچک، دستگاه های پزشکی، در اتاق عمل، بخشهای ویژه، بخشهای عمومی و سطوح کف آشپزخانه

### روش مصرف

- با توجه به شرایط مصرف، محلول را ۱ تا ۲/۵ درصد رقیق کرده و با تی، دستمال و یا به صورت اسپری سطح را ضد عفونی و پاک نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به پروتکل مصرف این محصول (بر اساس توصیه های HSE برای ضد عفونی سطوح) مراجعه گردد.

### خصوصیات

- اثر همزمان ضد عفونی و پاک کنندگی (ONE STEP)
- مناسب سطوح و تجهیزات حساس به الکل مانند انگوباتورها بر اساس MPG
- مناسب همه انواع سطوح بر اساس Biocide Directive
- تاییدیه کیفیت و کارائی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- تایید شده بر اساس استانداردهای EN اروپا
- تایید شده بر اساس RKI
- تاییدیه VAH/DGHM
- تاییدیه Eu-guideline 93/42 EC
- پاک کننده موثر چربی ها
- دارای فرمولاسیون بدون اسانس
- حاوی سه ترکیب آمونیوم چهار ظرفیتی
- فاقد فنول و آلدئید
- از بین برنده انواع باکتری ها (MRSA)، باسیل ها (TB)، قارچ ها (C.albicans) و ویروس ها (Vaccinia/HBV/HIV/HCV/BVDV/FCV)

**ventisept M PLUS**

Instruments disinfectant  
and cleaner concentrate  
aldehyde and phenol-free





## ventisept M PLUS

کنسانتره ضد عفونی و پاک کننده  
ابزار پزشکی و دندانپزشکی



### موارد مصرف:

ضد عفونی و پاک سازی ابزار و وسایل پزشکی و  
دندانپزشکی، وسایل بیهوشی و قابل استفاده در  
دستگاه های اولتراسونیک

### روش مصرف

- با توجه به شرایط مصرف، محلول را ۱ تا ۳ درصد رقیق کرده  
و ابزار را به طور کامل در آن غوطه ور و سپس آبکشی نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به پروتکل مصرف این  
محصول (بر اساس توصیه های AKI برای ضد عفونی ابزار)  
مراجعه گردد.

### خصوصیات

- اثر همزمان ضد عفونی و پاک کنندگی (ONE STEP)
- تاییدیه کیفیت و کارائی از وزارت بهداشت درمان  
و آموزش پزشکی
- تاییدیه 93/42 EC Eu-guideline برای ابزار پزشکی
- تایید شده بر اساس استانداردهای EN اروپا
- تایید شده بر اساس RKI
- تاییدیه VAH/DGHM
- ۱۴ روز ماندگاری محلول رقیق شده  
(باقابلیت مصرف مکرر)
- ۲ ماه ماندگاری محلول رقیق شده آماده  
(بدون استفاده شدن)
- دارای حداکثر سازگاری با مواد مختلف
- قابل استفاده در حمام های اولتراسونیک
- مناسب برای ضد عفونی سطوح آشپزخانه ها و  
صنایع غذایی
- فاقد فنول و آلدئید
- از بین برنده انواع باکتری ها (MRSA)،  
باسیل ها (TB)، قارچ ها (C.albicans) و ویروس ها  
(Rota/Vaccinia/HBV/HIV/HCV)

# Accessories

وسایل جانبی استفاده از محصولات پاک کننده و ضد عفونی کننده

- نگهدارنده دیواری محلول، دارای محافظه و کلید (Wall Dispenser)
- نگهدارنده دیواری محلول از جنس فولاد ضد زنگ (Stainless steel wall Dispenser)
- نگهدارنده تختی محلول از جنس فولاد ضد زنگ (Bed Dispenser)
- ظروف غوطه ورسازی در حجم های مختلف (Decobox)
- ظرف اندازه گیری محلول (Measure)
- پمپ گالن پنج لیتری
- کفپوش آنتی میکروبیال (Anti microbial Mat)



# FACILITIES

## خدمات آموزشی

از جمله خدمات این شرکت برگزاری سمینارهای آموزشی و ارائه مواد آموزشی جهت مصرف صحیح می باشد

- کارگاه های عملی کنترل عفونت جهت آموزش پرسنل خدماتی
- سمینارهای علمی کنترل عفونت ویژه پرسنل درمانی
- ارائه گواهینامه های معتبر برای سمینارها و کارگاه ها
- کتابچه های راهنمای کنترل عفونت
- پوستره های آموزشی کنترل عفونت بر اساس استانداردهای بین المللی
- پوستر روش استاندارد ضدعفونی بهداشت دست (EN 1500)
- پوستر روش استاندارد اسکراب جراحی دست (EN 12791)
- پوستر روش استاندارد پاکسازی و ضدعفونی اندوسکوپ ها
- پوستر روش استاندارد پاکسازی و ضدعفونی ابزار پزشکی و دندانپزشکی
- پوستر روش استاندارد پاکسازی و ضدعفونی سطوح
- پوستر روش استاندارد ضدعفونی سریع سطوح و ابزار
- پوستر جدول رقیق سازی (Dosing table)
- ویدیوهای آموزشی







German Quality

### شرکت شیمیایی نوین پاک شرق

دفتر تهران: خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه زرین، پلاک ۲۹  
کدپستی: ۱۹۴۸۸۴۴۹۳۳ - تلفن: (+۹۸۲۱) ۲۷۶۶۶ - فکس: (+۹۸۲۱) ۲۲۸۹۵۱۸۹  
No.29, Zarrin Alley, Dr.Shariati Ave.(After Mirdamad Blvd), Tehran-Iran  
PostalCode: 1948844933 - Tel: (+9821) 27666 - Fax: (+9821)22895189  
info@nipco.co - www.nipcopakhsh.com